

Anleitung Selbsttest

Schritt 1

Tupfer

Test




Deckel

Röhrchen

Schritt 2

**Ziehe den Deckel des
Röhrchens ab.
Achtung: geht schwer!!!**

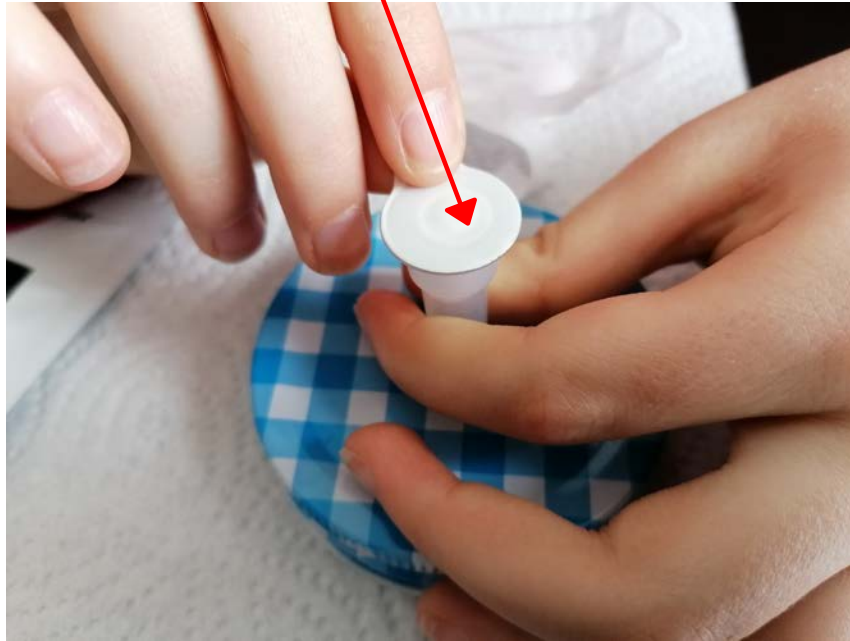

Schritt 3

Ziehe den Tupfer aus der Verpackung.



Schritt 4

Drehe den Tupfer in jedem Nasenloch hin und her. Zähle dabei bis 15.



Schritt 5



**Stecke den Tupfer in
das Röhrchen.
Drücke es unten
zusammen und
drehe den Tupfer
10x hin und her.**

**Ziehe den Tupfer
aus dem
Röhrchen. Drücke
das Röhrchen
dabei zusammen.**



Schritt 6

**Setze den Deckel
auf das Röhrchen.**



Schritt 7

**Öffne die
Verpackung mit
dem Test.**



**Kontrolliere, ob
alle Kügelchen
gelb sind.**

Schritt 8



**Tropfe genau 4
Tropfen in das
Loch..**

**15 Minuten
warten!**

